

TurtleTub Artikelnummern und Inhalt

Artikelnr. (Menge/ Geb.)	Inhalt Hinweis: Alle Wannen von TurtleTub enthalten einen integrierten Temperaturstreifen	Beschreibung / Empfohlene Verwendung
TT1100 (10/Geb.)	TurtleTub Standard-Set Jedes Set enthält 1 TurtleTub, 1 pH-neutrales mildes Babybad, 1 Fleecedecke, 1 Spülbecher, 1 Kopfbürste, 6 Waschlappen & eine Bedienungsanleitung	Für Neugeborenenintensivstationen und Neonatologie-Abteilungen, die jedem Patienten eine TurtleTub zur Verfügung stellen. Die beste Lösung für Patient und Klinik. Die Familien setzen die Pflege zu Hause fort, was sich vermutlich positiv auf die Patientenzufriedenheitswerte auswirkt. Ein Gebinde enthält 10 vollständige Badesets.
TT1101 (50/Geb.)	TurtleTub Standard-Zubehöropaket Jedes Paket enthält 1 pH-neutrales mildes Babybad, 1 Kopfbürste & 6 Waschlappen	Wenn die Patienten jeweils eine TurtleTub haben, enthält dieses Paket das Zubehör für weitere Bäder. Einlage nicht enthalten.
TT1106 (1/Geb.)	TurtleTub Starter-Set Jedes Set enthält 5 TurtleTubs, 10 Fleecedecken, 25 Zubehöropakete TT1107 und Bedienungsanleitungen	Dieses Starter-Set enthält alles, was die Klinik braucht, um die TurtleTub für mehrere Patienten zu verwenden.
TT1107 (50/Geb.)	TurtleTub Zubehöropaket Jedes Paket enthält 1 Einweg-Einlage, 1 pH-neutrales mildes Babybad, 1 Kopfbürste & 6 Waschlappen	Wenn die TurtleTub für mehrere Patienten verwendet wird, enthält dieses Paket das Zubehör für weitere Bäder. Einlage enthalten.
TT1102 (100/Geb.)	TurtleTub-Babybad Einwegpackungen 10 ml pH-neutrales mildes Babybad	Babybad in Einzelpackungen
TT1103 (25/Geb.)	TurtleTub kleine Fleecedecken 50,8 cm x 58,4 cm	Kleine, wiederverwendbare Fleecedecken mit hervorragenden Thermaleigenschaften. Nach jedem Gebrauch waschen.
TT1104 (10/Geb.)	TurtleTub Einzelwanne Mit Bedienungsanleitung	Nur die TurtleTub, ohne Zubehör.
TT1105 (100/Geb.)	TurtleTub Einweg-Einlagen im Großgebinde	Einlagen für die TurtleTub zur Verwendung bei mehreren Patienten.
TT1108 (10/Geb.)	TurtleTub Aufbewahrungsnetze	Ein Netz zum Aufhängen und Lagern der TurtleTub.
TT1109 (25/Geb.)	TurtleTub Spülbecher	Spülbecher
TT1110 (25/Geb.)	TurtleTub große Fleecedecken 50,8 cm x 76,2 cm	Große, wiederverwendbare Fleecedecken mit hervorragenden Thermaleigenschaften. Nach jedem Gebrauch waschen.



Hergestellt von:
CATAPULT PRODUCTS, LLC
4677 S. Cherry St.
Salt Lake City, UT 84123

385-212-4933 (Telefon)
385-234-4850 (Fax)
info@catapultmed.com
www.catapult-products.com

REF TT1100
REF TT1104
REF TT1106



Bedienungsanleitung (Klinik-/Profi-Version)

LATEXFREI/DEHP-FREI/BPA-FREI
ZUM PATENT ANGEMELDET

Folgende Verwendungen sind für die TurtleTub zugelassen:

- 1. Die TurtleTub ist nur für die Verwendung für jeweils einen Säugling bestimmt.**
- 2. Die TurtleTub kann nur dann für mehrere Patienten verwendet werden, wenn dabei jeweils eine TurtleTub Einweg-Einlage verwendet wird und unsere Reinigungsanleitung für die Verwendung für mehrere Patienten befolgt wird.**



⚠️ WARNUNG:

Gefahr des Ertrinkens

Babys können **ertrinken**, wenn sie in Baby-Badewannen gebadet werden.

Um dies zu verhindern:

- **Bleiben Sie** in Armreichweite von Ihrem Baby.
- **Verlassen** Sie sich nie auf ein Klein- oder Vorschulkind, das dem Baby helfen oder Sie bei Gefahr alarmieren soll. Es sind auch schon Säuglinge ertrunken, wenn andere Kinder in oder bei der Wanne waren.
- Babys können bei einer Wassertiefe von **2,5 cm** ertrinken. Verwenden Sie so wenig Wasser wie möglich, um Ihr Baby zu baden.
- Stellen Sie die Wanne bei jedem Gebrauch auf einen stabilen, rutschfesten Untergrund, in ein **leeres** Waschbecken oder eine leere normale Badewanne.
- Lassen Sie an Badewanne **oder Waschbecken** den Abfluss offen.

Sturzgefahr Babys können **Kopfverletzungen** erleiden, wenn sie aus der Babybadewanne fallen.

Um Stürze zu vermeiden:

- Stellen Sie die Wanne bei jedem Gebrauch auf einen stabilen, rutschfesten Untergrund, in ein **leeres** Waschbecken oder eine leere normale Badewanne.
- **Die Wanne niemals mit dem Baby hochheben oder tragen.**

TurtleTub™ Hinweise zum Gebrauch:

Zum Baden des gewickelten Säuglings. Kann auch für Tauchbäder verwendet werden. Für Frühgeborene und Säuglinge bis zu 3 Monaten (korrigiertes Alter).

TurtleTub Bedienungsanleitung:

1. Kontrollieren Sie die Wanne vor Gebrauch und verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt, zerbrochen oder demontiert ist.
2. Regen Sie die Eltern dazu an, das Kind zu baden.
3. Reinigen Sie die TurtleTub vor Gebrauch - siehe Schritte 26 und 27.
4. Verändern Sie bei Bedarf die Umgebung, um Zugluft und Sinnesreize zu vermeiden.
5. Bereiten Sie die TurtleTub mit Inhalt zum Gebrauch vor.
6. Verwendung für einen Patienten: Schreiben Sie den Namen des Kindes auf das Etikett (an der Seite der Wanne).
7. Verwendung für mehrere Patienten: Legen Sie eine TurtleTub-Einlage in die Wanne.
8. Ziehen Sie das Kind aus.
9. Wenn das Kind an Leitungen hängt, ziehen Sie diese heraus. Aufgeklebte Anschlüsse können bleiben. Sie lassen sich in nassem Zustand leichter entfernen.
10. Bringen Sie die Hände des Kindes neben sein Gesicht und wickeln Sie es in eine Fleecedecke.
11. Füllen Sie das Wasser mit 38-39 °C warmem Wasser. Testen Sie die Wassertemperatur mit der Hand, verlassen Sie sich nicht nur auf den Temperaturstreifen. Das Wasser sollte dem Kind bis zur Brust reichen. Wenn Sie eine Einlage verwenden, achten Sie darauf, dass diese glatt (faltenfrei) am Temperaturstreifen anliegt.

12. Füllen Sie den Spülbecher mit Wasser und stellen Sie ihn in die Wanne wie auf Abb. 1 zu sehen ist.



Abbildung 1

13. Legen Sie das gewickelte Kind in die Wanne. Das Bad sollte so kurz wie möglich sein (7-10 Minuten).
14. Waschen Sie das Gesicht des Kindes mit sauberen, 10 cm x 10 cm großen Waschlappen ohne Reinigungsmittel. Waschen Sie die Augen nacheinander vom inneren Augenwinkel nach außen. Verwenden Sie für jedes Auge einen sauberen Abschnitt des Lappens. Waschen Sie nur die Ohrmuscheln. Waschen Sie Gesicht, Hals und den Bereich hinter den Ohren.
15. Wickeln Sie einen Arm vorsichtig aus und waschen Sie das Kind mit Reinigungsmittel auf der behandschuhten Hand. Eltern können ihr Kind auch mit bloßen Händen waschen. Waschen Sie das Kind mit festen, aber dennoch sanften Berührungen. Spülen Sie den Arm ab und wickeln Sie ihn wieder ein.
Gehen Sie bei den übrigen Extremitäten und dem Oberkörper ebenso vor. Wenn das Kind Leitungen am Oberkörper hat, ziehen Sie diese heraus. Denken Sie daran, das Kind während des gesamten Bades eingewickelt zu lassen.
16. Drehen Sie das Kind vorsichtig auf die Seite und waschen Sie ihm den Rücken, indem Sie ihn mit der Fleecedecke abreiben. Legen Sie das Kind wieder auf den Rücken.
17. Waschen Sie den Genitalbereich mit Waschlappen (10x10 cm) und Reinigungsmittel.
18. Kontrollieren Sie die Temperatur und füllen Sie bei Bedarf warmes Wasser nach.
19. Waschen Sie den Kopf des Kindes zuletzt, um die Wärme im Körper zu halten. Bürsten Sie den Kopf mit der beiliegenden Bürste und drücken Sie so fest auf, dass die Borsten sich biegen. Spülen Sie den Kopf des Kindes mit Wasser aus dem sauberen Spülbecher ab.
20. Nehmen Sie ein warmes Handtuch (wird von der Klinik bereitgestellt) fest unter die Arme und stellen Sie sich damit direkt neben die Wanne.
21. Wickeln Sie das Kind aus und heben Sie es aus der Wanne direkt in das warme Handtuch. Tupfen Sie es trocken und achten Sie insbesondere darauf, dass der Kopf trocken ist.
22. Legen Sie das Kind ins Bett auf ein weiteres warmes Klinikhandtuch und wickeln Sie es ein.
23. Messen Sie die Temperatur unter dem Arm.
24. Schließen Sie die Leitungen wieder an, falls nötig.
25. Bereiten Sie das Kind zum Füttern oder zum Halten mit Hautkontakt vor. Oder kleiden Sie es an und legen Sie es zum Schlafen hin.
26. Reinigung bei Verwendung für einen Patienten: Gießen Sie das Wasser über die vorgesehene Öffnung aus. Reinigen Sie die TurtleTub mit milder Seife und Wasser und trocknen Sie sie.
27. Reinigung bei Verwendung für mehrere Patienten: Gießen Sie das Wasser über die vorgesehene Öffnung aus. Werfen Sie die TurtleTub-Einlage weg. Reiben Sie die TurtleTub mit für Kliniken geeigneten Alkohol-Reinigungstüchern ab, beispielsweise Sani-Cloth Super (oben violett).
28. Waschen Sie die Fleecedecke gemäß den Anweisungen der Klinik für Säuglingswäsche.
29. Hängen Sie die TurtleTub in einem Aufbewahrungsnetz (TT1108) auf oder decken Sie die Wanne mit einer Babydecke ab, damit sie bis zum nächsten Gebrauch sauber bleibt.