

REF.^a TT1100

REF.^a TT1104

REF.^a TT1106

Instruções de Utilização



**TurtleTub é um produto de utilização num único paciente
(com a devida exceção indicada abaixo)**

**TurtleTub poderá ser reutilizado em vários pacientes se for
colocado o revestimento descartável TT1107 ou TT1105.**

**NÃO CONTÉM LÁTEX/NÃO CONTÉM DEHP
PATENTE PENDENTE**



Fabricado por:
CATAPULT PRODUCTS, LLC
Salt Lake City, UT 84108
385-212-4933
info@turtletubbaby.com
www.turtletubbaby.com



Indicações de utilização TurtleTub™:

Destinado ao banho de bebês enfaixados.

Instruções de Utilização TurtleTub:

1. Nunca deixe o bebê sozinho no banho, nem que seja por apenas alguns segundos.
2. Incentive os pais a darem banho ao bebê.
3. Modifique o ambiente, conforme necessário, para diminuir os estímulos sensoriais.
4. Organize os acessórios da TurtleTub para utilização.
5. No caso de utilização num único paciente: Escreva o nome do bebê numa etiqueta (no lado da banheira).
6. No caso de utilização em vários pacientes: Coloque o revestimento TurtleTub na banheira.
7. Dispa o bebê.
8. Se o bebê tiver elétrodos, desligue-os. A parte de gel colante do eletrodo pode permanecer no bebê. É mais fácil de remover se estiver molhado.
9. Posicione o bebê com as mãos junto ao rosto e enfaixe-o confortavelmente num cobertor de velo.
10. Encha a TurtleTub com água até a temperatura atingir os 38 °C (101-103 F). A água deve cobrir o peito do bebê. Se utilizar o revestimento, certifique-se de que está bem esticado (sem rugas) na tira da temperatura.
11. Encha o copo com água e coloque-o na banheira, tal como ilustrado na Figura 1.



Figura 1

12. Coloque o bebê enfaixado na banheira.
13. Utilize toalhetes de lavagem 4x4 sem sabonete para lavar o rosto do bebê. Lave um olho de cada vez, do canto interno do olho para fora. Use uma parte limpa do toalhete em cada olho. Limpe apenas o ouvido externo. Lave o pescoço e atrás das orelhas.
14. Desenfaixe cuidadosamente um braço e coloque sabonete para bebê nas suas mãos para lavar o bebê. Certifique-se de que usa movimentos suaves, mas firmes. Passe por água e volte a enfaixar. Repita em todas as extremidades e no peito. Retire os elétrodos. Não se esqueça de manter o bebê confortavelmente enfaixado durante o banho.
15. Vire cuidadosamente o bebê de lado e lave as costas esfregando com o cobertor de velo. Volte a colocar o bebê na posição de decúbito dorsal.
16. Lave a área genital com um toalhete de lavagem 4x4.
17. Verifique a tira da temperatura e adicione água morna, conforme necessário.

18. Lave a cabeça do bebê no fim, para conservar o calor. Utilize a escova para o couro cabeludo fornecida e exerça pressão suficiente de forma a dobrar as cerdas. Use o copo com água limpa para enxaguar a cabeça do bebê.
19. Aproxime-se da banheira com uma toalha aquecida (fornecida pelo hospital) debaixo dos seus braços.
20. Desenfaixe o bebê, retire-o da banheira e coloque-o na toalha aquecida. Seque com suaves toques e certifique-se de que a cabeça do bebê fica seca.
21. Coloque o bebê na cama, sobre um cobertor aquecido do hospital, e envolva o bebê, incluindo a cabeça.
22. Meça a temperatura axilar.
23. Se necessário, coloque elétrodos novos no bebê.
24. Prepare o bebê para segurá-lo em contacto pele com pele, para alimentá-lo, ou vista-o e coloque-o na posição de dormir.
25. Limpeza no caso de utilização num único paciente: Use o bico para esvaziar a água da banheira. Lave a TurtleTub com água e sabonete suave e seque.
26. Limpeza no caso de utilização em vários pacientes: Use o bico para esvaziar a água da banheira. Elimine o revestimento TurtleTub. Lave a TurtleTub de acordo com o protocolo hospitalar relativo a produtos usados por vários pacientes.
27. Lave o cobertor de velo de acordo com o protocolo hospitalar relativo a roupa de bebê.

Números de itens e conteúdos da TurtleTub

N.º de item (Qtd./caixa)	Descrição e conteúdos	Sistema de utilização num único paciente	Sistema de utilização em vários pacientes	Itens "à la carte"
TT1100 (10/caixas)	Kit padrão TurtleTub - Cada kit contém 1 TurtleTub com indicador de temperatura integrado, 1 sabonete suave de pH neutro para bebê, 1 cobertor de velo, 1 copo, 1 escova para couro cabeludo, 6 toalhetes de lavagem esterilizados 4 x 4 e instruções de utilização.	X		
TT1101 (50/caixas)	Embalagem de acessórios padrão TurtleTub - Cada embalagem inclui 1 sabonete suave de pH neutro para bebê, 1 escova para couro cabeludo e 6 toalhetes de lavagem esterilizados 4 x 4.	X		
TT1106 (1/caixa)	Kit de iniciação c/revestimento TurtleTub - Cada kit contém 5 banheiras (cada uma com um indicador de temperatura integrado e um copo), 10 cobertores de velo e 25 embalagens de acessórios c/revestimento.		X	
TT1107 (50/caixas)	Embalagem de acessórios c/revestimento TurtleTub - Cada embalagem inclui 1 revestimento descartável, 1 sabonete suave de pH neutro para bebê, 1 escova para couro cabeludo e 6 toalhetes de lavagem esterilizados 4 x 4		X	
TT1102 (100/caixas)	Embalagens de utilização única de sabonete para bebê TurtleTub - Sabonete suave de pH neutro para bebê (10 ml)	X	X	X
TT1103 (25/caixas)	Cobertores de velo TurtleTub	X	X	X
TT1104 (10/caixas)	Banheira individual TurtleTub - (com indicador de temperatura integrado)	X	X	X
TT1105 (100/caixas)	Revestimentos TurtleTub (a granel)		X	
TT1108 (10/caixas)	Sacos de rede para arrumação TurtleTub	X	X	X